

## Impress-E Wash Οδηγίες Χρήσης

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

**ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Όνομα Προϊόντος	Impress-E Wash 2 x 50ml
Επωνυμία Εταιρείας	Perfection Plus Ltd
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, HB
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας	+44 (0) 2380 866 677

### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤ<sup>REF</sup>

PP010/1282 Impress-E Wash Light Body 2 x 50ml

PP010/1283 Impress-E Wash Medium Body 2 x 50ml

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σιλικόνη που ενδείκνυται για τις τεχνικές δύο βημάτων putty/wash, ενός βήματος putty/wash και τύπου σάντουιτς. Η αποτύπωση μπορεί να επιμεταλλωθεί.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρόνοι κατεργασίας και σκλήρυνσης προϊόντος:

Κατεργασία: 2 min. Ελάχιστος χρόνος στο στόμα: 1min 30s. Συνολικός χρόνος κατεργασίας/σκλήρυνσης: 3min 30s.

1. Στεγνώστε τις προς αναπαραγωγή περιοχές και αποτρέψτε την περαιτέρω εισροή υγρού σε αυτές. Τοποθετήστε τη φύσιγγα στον διανομέα.
2. Αφού αφαιρέσετε το καπάκι, εξωθήστε μια μικρή ποσότητα σιλικόνης από τα δύο ακροφύσια, μετακινώντας τον μοχλό αρκετές φορές.
3. Τοποθετήστε το πώμα ανάμειξης στη φύσιγγα και, εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το μικρό στοματικό ρύγχος επάνω του για τέλεια και ακριβή αποτύπωση των ούλων. Ενεργοποιήστε τον μοχλό με δύναμη έτσι ώστε να εξέλθει το Impress-E Wash από το καπάκι, τοποθετώντας το αναμεμιγμένο υλικό στο δισκάριο αποτύπωσης.
4. Εισαγάγετε στο στόμα.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η εξωθημένη σιλικόνη είναι ομοιόμορφα χρωματισμένη. Για να διατηρήσετε σωστά τυχόν προϊόν που παραμένει στη φύσιγγα, αφήστε το καπάκι ανάμειξης τοποθετημένο μέχρι την επόμενη χρήση. Πριν εφαρμόσετε ένα νέο ρύγχος ανάμειξης, βεβαιωθείτε ότι η σιλικόνη βγαίνει από τα ακροφύσια κανονικά. Εάν η φύσιγγα παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφραχθεί από σκληρυμένη σιλικόνη, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί με ένα λεπτό εργαλείο πριν τοποθετηθεί ένα νέο ρύγχος ανάμειξης.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι χρόνοι κατεργασίας και σκλήρυνσης μπορούν να επηρεαστούν από:

- Διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του υλικού, του περιβάλλοντος ή/και των χεριών του χειριστή κατά την ανάμειξη (οι υψηλότερες θερμοκρασίες τους μειώνουν ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες τους παρατείνουν)
- Μεταβολές στην ταχύτητα ή/και στη δύναμη που ασκείται κατά την ανάμειξη
- Υγρασία
- Επαφή της σιλικόνης με ελαστικό απομονωτήρα ή γάντια από λατέξ ή με συστατικά τέτοιου υλικού που πιθανώς να υπάρχουν στα δόντια κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης (συνιστώνται γάντια βινυλίου).



Μην αναποδογυρίζετε τα καπάκια των δοχείων και χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο χρωματιστό δοσομετρητή για κάθε πάστα. Κλείνετε καλά τα δοχεία μετά τη χρήση. Για να εξαλείψετε ίχνη σάλιου ή αίματος και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη πρόσφυση της λεπτόρρευστης αποτύπωσης στην προκαταρκτική αποτύπωση, εκπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά. Η αποτύπωση μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ειδικές συσκευές. Χυτεύστε το μοντέλο σε γύψο τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την απομάκρυνση από το στόμα.

Για απολύμανση, βυθίστε την αποτύπωση για 5 λεπτά σε διάλυμα γλουταραλδεϋδης (συγκέντρωση 0,5%-2%) ή υποχλωριώδους νατρίου (συγκέντρωση 0,1%-1%). Εκπλύνετε την αποτύπωση κάτω από τρεχούμενο νερό μετά την απολύμανση.

**Προσοχή**

Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.



**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**

Ανατρέξτε στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

