

## ImpressPLUS Bite Registration

Υλικό Καταγραφής Δήξης Σιλικόνης Αθροιστικού Τύπου

### Οδηγίες Χρήσης

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από επαγγελματίες.

#### ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

#### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Όνομα Προϊόντος	Υλικό Καταγραφής Δήξης Impress Plus
Επωνυμία Εταιρείας	Perfection Plus Ltd
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, HB
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας	+44 (0) 2380 866 677

#### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [REF]

PP010/1350 – ImpressPlus Bite Reg Regular set

PP010/1352 – ImpressPlus Bite Reg Fast Set

PP010/1354 – ImpressPlus Bite Reg Super-Fast Set

Ενδείξεις	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ακριβείς καταγραφές σύγκλεισης</li> <li>Βασικό υλικό γραφικής καταγραφής</li> <li>Δημιουργία μικρών τμημάτων μοντέλων</li> </ul>		
	Super-Fast Set	Fast Set	Regular Set
Συνολικός χρόνος κατεργασίας*	0:30	0:40	1:30
Χρόνος στο στόμα	0:45	1:00	3:00
Συνολικός χρόνος σκλήρυνσης*	1:15	1:40	4:30
Μεταβολή διαστάσεων (%)	<0.1		
Σκληρότητα Shore A	85		

\*Η εφαρμογή γίνεται στους 23°C ± 2 / 73°F ± 4,50 ± 5% σχετική υγρασία. **Προσοχή!** Η υψηλότερη θερμοκρασία μειώνει τους χρόνους κατεργασίας και σκλήρυνσης και η χαμηλότερη θερμοκρασία τους επεκτείνει.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ

Τοποθετήστε της φύσιγγας: Τοποθετήστε τη φύσιγγα στο πιστόλι διανομής ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή και αφαιρέστε το καπάκι. Εξωθήστε το υλικό αποτύπωσης έως ότου βγαίνει και από τους δύο θαλάμους με τον ίδιο ρυθμό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το κατάλληλο ρύγχος ανάμειξης. Ένα ενδοστοματικό ρύγχος μπορεί να τοποθετηθεί στο ρύγχος ανάμειξης.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόστε το υλικό καταγραφής δήξης σύμφωνα με την επιθυμητή τεχνική (συγκλεισιακή επιφάνεια ή παρειακή επιφάνεια). Εξωθήστε το υλικό πρώτα σε περιοχές όπου τα δόντια έχουν προετοιμαστεί κρατώντας το άκρο του ρύγχους ανάμειξης βυθισμένο στο υλικό για να αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων αέρα και ζητήστε από τον ασθενή να δαγκώσει. Απομακρύνετε προσεκτικά το σετ καταγραφής δήξης μετά τον συνιστώμενο χρόνο. Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα του υλικού από το στόμα. Περικόψτε την καταγραφή δήξης για να διασφαλιστεί η σωστή έδραση στο μοντέλο. Μετά τη χρήση, αφήστε το ρύγχος ανάμειξης στη φύσιγγα καθώς λειτουργεί ως καπάκι. Τα ενδοστοματικά ρύγχη και τα ρύγχη ανάμειξης προορίζονται για μία μόνο χρήση.

#### ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Μετά την απομάκρυνση της καταγραφής δήξης από το στόμα, εκπλύνετε με κρύο νερό. Η αποτύπωση μπορεί στη συνέχεια να απολυμανθεί με κατάλληλα απολυμαντικά διαλύματα ή εκνεφώματα όπως η γλουταραλδεΐδη 2%. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απολύμανση των αποτυπώσεων: Περιοδικό του Αμερικανικού Οδοντιατρικού Συλλόγου (JADA) 1991, τόμος 122, τεύχος (8), σελ. 110.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η επαφή με γάντια από λατέξ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αντίδραση σκλήρυνσης. Συνιστώνται τα γάντια βινυλίου.
- Μη συνδυάζετε με σιλικόνες συμπίκνωσης, πολυαιθέρα ή πολυσουλφίδια.
- Να αποφεύγεται η επαφή του υλικού με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, εκπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε άμεσα έναν ιατρό.
- Να αποφεύγεται η διαρροή του υλικού στα ενδύματα καθώς δεν μπορεί να αφαιρεθεί χημικά.
- Οι ουσίες που περιέχει το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα.
- Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Να αποθηκεύετε το υλικό σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 - 25°C (50 - 77°F).

Να αποθηκεύετε την αποτύπωση σε θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 25°C/77°F).



## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτά τα υλικά έχουν παρασκευαστεί για χρήση αποκλειστικά από οδοντιάτρους και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αντιστοιχούν στο πραγματικό επίπεδο γνώσης όσον αφορά τις οδοντιατρικές τεχνικές. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από άλλες χρήσεις ή από λανθασμένο χειρισμό.

### **Προσοχή:**



Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

## **ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**

Τα παραπάνω αναγράφονται σε κάθε συσκευασία και θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε επικοινωνία που απαιτεί αναγνώριση του προϊόντος.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Totton  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St. Marys Place  
Dublin, Ireland  
D07 94AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

