

Temporärt kavitetfyllnadsmaterial

Bruksanvisning

VIKTIGT

Läs noga igenom denna 'Bruksanvisning' före hantering.

SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR ANVÄNDNING INOM TANDVÅRD

IDENTIFIERING

Ett temporärt fyllnadsmaterial med en syntetisk resinbas. Med adekvat hållfasthet och kan lätt avlägsnas. Med god adhesion mot dentinet och med utmärkt marginalanpassning. Bra tätningsegenskaper, lättanvänd konsistens. Detta är inte ett permanent fyllnadsmaterial och rekommenderas att användas under högst 4 veckors tid.

Produktnamn	Temporary Cavity Filling Material (Temporärt kavitetfyllnadsmaterial, TCFM)
Företagsnamn	Perfection Plus Ltd
Företagets adress	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Företagets telefonnummer	+44 (0) 2380 866 677

PRODUKTKOD - REF

PP010/0006 – 8 g tub

PP010/0009 – 30 g burk

ANVÄNDARINDIKATIONER

För provisoriska fyllningar såsom temporärt täckmaterial för kaviteter. För temporära inlays. För temporär försegling efter endodontiska behandlingar. För temporär fixering av tandkronor.

BRUKSANVISNING

Applicera den erforderliga mängden i kaviteten medelst ett instrument. Kaviteten kan lämnas fuktig. Temporärt fyllnadsmaterial härdas vid absorption av fukt och ger en ogenomtränglig försegling. Undvik tuggbelastning upp till 2 timmar efter appliceringen.

För att tillfälligt fästa fast tandkronor, applicera ett lager material på insidan av kronan och fäst den som vanligt.


OBS! För att öppna tuben ta bort hatten, vänd hatten helt om och stick hål på membranet.

VARNINGAR

Exponera inte användare som är känt allergiska mot detta material. På grund av fuktkänsligheten, ska tuben eller burken stängas igen omedelbart efter uttagandet av materialet, annars kan materialets viskositet ökas genom fuktupptagning med den konsekvensen att materialet inte kan tas ut ur behållaren mera.

FÖRVARING

Förvara produkten på sval, torr plats (5 – 25°C). Det är viktigt att hatten sätts tillbaka ordentligt efter varje användning.

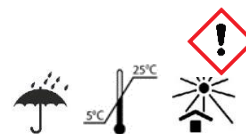

Batchkod/Utgångsdatum

Batchkoden anger ett öppningsdatum med tillverkningsmånad, år, datum med en siffra sist för att unikt kunna identifiera materialet. Vänligen ange detta batchnummer i all korrespondens. Utgångsdatumet anges i år, månad format. Produkten får inte användas efter detta datum.

Försiktighet



Om en allvarig incident i samband med produkten inträffar bör detta rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

