

## Yağsız Profilaksi Macunu

### Kullanım Talimatları

#### **ÖNEMLİ**

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca profesyonel kullanım içindir.  
**DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

#### **TANIM**

Dental ve post-operatif hassasiyetin tedavisi için yağsız profilaksi macunu.

Ürün Adı	Yağsız Profilaksi Macunu
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

#### **ÜRÜN KODU**

PP010/0051 – Orta Kıvamlı Nane Aromalı  
PP010/0054 – Orta Kıvamlı Portakal Aromalı  
PP010/0053 – Kaba Kıvamlı Nane  
PP010/0052 – İri Kıvamlı Kiraz Aromalı

#### **KULLANIM ENDİKASYONLARI**

Profilaksi macunu tiksotropiktir: bu nedenle istenirse, macunun akışkanlığı kullanımdan önce nazıkçe spatülasyonla artırılabilir. Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. En iyi sonuçlar için profilaksi tipi el aleti ve kauçuk kap/ kıl kombinasyonu ile kullanın.

#### **KULLANIM TALİMATLARI**

Kabı/fırçayı macunla doldurun ve düşük hızda her bir diş yüzeyinde gezdirin, kabın/fırçanın kenarının dişeti sulkusunun serbest kenarının altına indiğinden emin olun. Açıkta kalan tüm yüzeyler tedavi edilene kadar bu prosedürü her diş için tekrarlayın. Ağdasız Diş İpi, fazla macunu interproksimal alanlardan çıkarmak için kullanılabilir.

#### **SAKLAMA**

Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. Serin ve kuru bir ortamda saklayın.



#### **PARTİ KODU/SON KULLANMA TARİHİ**

Tüm yazışmalarda parti numarası belirtilmelidir. Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile birlikte açık bir üretim tarihi, ay, yıl ve gün formatı verir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

#### **Dikkat**



Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

