

RetractPLUS

Kullanım Talimatları

ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca bir diş hekimi tarafından kullanılmak içindir. RetractPLUS dişeti retraksiyonu ve hemostaz sağlamak için formüle edilmiş bir astrenjandır.

TANIM

Ürün Adı	RetractPLUS Retraksiyon Macunu 2 x 2 Şırınga ve 12 Uç
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

ÜRÜN KODU - REF

010/1024 RetractPLUS Retraksiyon Macunu 2 x 2g Şırınga ve 12 Uç

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Ölçü alma, Simantasyon ve kavite hazırlığı.

KONTRENDİKASYONLAR

Alüminyum Klorüre karşı alerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanmayın. Önemli periodontal hastalığı veya furkasyon tutulumu olan hastalarda kullanmayın.

ÖNLEMLER

- Kanül dağıtım ucunu sulkusa sokmayın.
- Ölçü materyalinin polimerizasyonunun engellenmesini önlemek için ölçü almadan önce tüm macunun çıkarıldığından emin olun.
- Dağıtım ucu tek kullanımlıktır. Kullandıktan sonra ucu çıkarın ve uygun şekilde atın.
- Macun şırıngasını, verilen yeniden kapatılabilir folyo torbada saklamadan önce tekrar kapatın; bu birden fazla kez kullanılabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Şırınganın kapağını çıkarın. Malzemenin daha sonra saklanması için kapağı muhafaza ettiğinizden emin olun.
2. Tavlama luer dağıtım ucunu şırınga ucunun ucuna yerleştirin, çevirerek yerine kilitleyin. Yumuşak uç optimum erişim sağlar.
3. Hazırlanan dişi durulayın ve havayla kurutun. Dağıtım ucunu sulkusun hemen üzerinde tutarken ve diş preparasyonunun aksel düzlemine yaklaşık olarak paralel hizalarken macunu sulkusa yavaşça ekstrüde edin. Dağıtım ucunu sulkusa sıkıştırmamaya dikkat edin.
4. Yeterli doku retraksiyonu elde etmek için sulkus içine yeterli malzeme çıkardığınızdan emin olun.
5. RetractPLUS macununun sulkusta en az bir veya iki dakika kalmasına izin verin. Retraksiyon sağlandığında genellikle marjinal diş eti soluklaşacaktır.
6. Hemostaz sağlandıktan sonra macun, hava-su şırıngası ve tükürük ejektörü veya emme ucu kullanılarak iyice durulanarak çıkarılmalıdır.
7. Ölçü almadan önce RetractPLUS'ın tamamen çıkarıldığını doğrulamak için tedavi bölgesini inceleyin.
8. RetractPLUS dağıtım ucunu çıkarın ve kullandıktan sonra uygun şekilde atın. Kapatılabilir folyo torbada saklamak için yeniden kapatın.

UYARI!

Kanül dağıtım ucunu sulkusa sokmayın. Ölçü materyalinin polimerizasyonunun engellenmesini önlemek için ölçü almadan önce tüm macunun çıkarıldığından emin olun.

DİKKAT

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.



SAKLAMA

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve oda sıcaklığında (5-25°C) saklayın.



Parti kodu/ Son Kullanma Tarihi

Parti kodu, malzemenin partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile ay, yıl, gün formatında açık bir üretim tarihi verir. Lütfen tüm yazışmalarda bu parti numarasını belirtin. Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilir. Bu tarihten sonra ürünü kullanmayın.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

