

Çinko Fosfatlı Siman Kullanım Talimatları

ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca profesyonel kullanım içindir.
DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR

TANIM

Ürün Adı	Çinko Fosfatlı Siman
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

ÜRÜN KODU - REF

PP010/0017 - Çinko Fosfat Siman 90g Toz
PP010/0018 - Çinko Fosfat Siman 30ml Sıvı
PP010/0016 - Çinko Fosfat Siman 45g Toz & 15ml Sıvı

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Kronların, köprülerin, inleylerin ve onleylerin simantasyonu. Ortodontik bantların simantasyonu.

KULLANIM TALİMATLARI

KONTRENDİKASYONLAR: Açıkta kalan pulpa üzerine veya pulpaya yakın dentine uygulamayın (pulpada tahriş oluşabilir)

KARIŞTIRMA: Toz: sıvı oranı $23 \pm 1^\circ\text{C}$ ve $\%50 \pm 10$ RH'de 1,8:1 (m:m) veya 3,0:1'dir (m:v). Toz ve sıvıyı temiz, kuru cam levha üzerine dağıtın - KAĞIT PEDLER VE PLASTİK BLOKLAR UYGUN DEĞİLDİR. Tozu altı parçaya bölün. Sıvıya bir parça ekleyin ve 'silikat' veya paslanmaz çelik bir spatula kullanarak 15 saniye boyunca iyice spatüle edin. Kalan kısımlar için işlemi tekrarlayın. Toplam karıştırma süresi 1½ dakika. Fazla toz kullanmak veya simanı döşeme üzerine yayarak ısıyı dağıtmadan hızlı karıştırmak, çalışma ve sertleşme süresini kısaltacaktır. Pürüzsüz kremi bir kıvam elde edilmelidir.

ÇALIŞMA SÜRESİ: $22-24^\circ\text{C}$ 'de, $\%40-60$ RH'de karıştırma sonundan itibaren 45 saniyeden az olmamalıdır.

KLİNİK ORTAM SÜRESİ: Karışımın bitiminden itibaren en fazla 7 dakika.

UYGULAMA: Hem diş hem de metal yüzeyler temiz, kuru ve kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır. Restorasyon bandına veya brakete yapıştırıcı sürün ve mümkün olduğunca çabuk yerine oturtun. Optimum özellikler, siman sertleşirken sıkıştırmaya devam edilerek elde edilir. Fazlalıkları ancak siman sertleştikten sonra alın.

UYARI!

Sıvı Fosforik Asit içerir. KOROZİF. Yanıklara neden olur. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin).



Dikkat



Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.

SAKLAMA

Toz ve sıvıyı serin ve kuru bir yerde $5-25^\circ\text{C}$ 'de saklayın.

Parti kodu/ Son Kullanma Tarihi

Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile ay, yıl, gün formatında açık bir üretim tarihi verir. Lütfen tüm yazışmalarda bu parti numarasını belirtin. Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilir. Bu tarihten sonra ürünü kullanmayın.



TEST

Test amacıyla, toz sıvı oranı $23 \pm 1^\circ\text{C}$ ve $\% 50 \pm 10$ bağıl nemde 1,80 g ila 1,00 g'dır.

ISO 9917-1 net sertleşme süresi: 36 ila 38°C 'de karıştırma sonundan itibaren maksimum 6 dakika 30 saniye.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Yolu
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

