

ImpressPLUS-5 Alginate Fast Set

Instructies voor gebruik

BELANGRIJK

Lees dit document 'Instructies voor gebruik' voor u het product in gebruik neemt. Dit product is alleen voor professioneel gebruik.

SPECIAAL SAMENGESTELD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE

ImpressPLUS-5 Alginate voldoet aan de ISO 21563 specificatie. Dit product is compatibel met pleisters type 3 en type 4 die voldoen aan ISO 6873.

IDENTIFICATIE

Stofvrij materiaal, maar voorzichtigheid is geboden bij het openen van de zak en het verwijderen van het poeder.

Productnaam	ImpressPLUS-5 Alginate Fast Set
Bedrijfsnaam	Perfection Plus Ltd
Bedrijfsadres	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Telefoonnr. bedrijf	+44 (0) 2380 866 677

PRODUCTCODE - REF

PP010/1299 ImpressPLUS-5 Alginate Fast Set

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Een eenvoudig te gebruiken afdruckmateriaal om basis- of eerste indrukken te maken. Geen speciale behandeling nodig voor gebruik.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor muntsmaak of *een allergie voor Basic Red 1:1 kleurstof*.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Keer de zak twee of drie keer om, om eventueel samengedrukt materiaal los te maken voor gebruik.
2. Doop de lepel lichtjes in het poeder, klop zachtjes en verwijder overtollig poeder met de spatel. *Verzegel de zak onmiddellijk na het aanbrengen van het poeder*. Zie de aanbevolen water-/alginaatverhoudingen hieronder.
3. Doe in een schone, droge, flexibele mengkom eerst water en voeg dan poeder toe en meng krachtig.

Tabel met mengtijden

Mengtijd met spatel	45 seconden
Werkijd om de afdrucklepel te vullen	1 minuut 45 seconden (inclusief 45 seconden mengtijd)
Initiële insteltijd voor het inbrengen in de mond	1 minuut 55 seconden (inclusief 1 minuut 45 seconden werktijd). Slechts 30 seconden in de mond.

Metingen uitgevoerd bij 23°C met gedeïoniseerd water. Variaties in de verhouding poeder/water, temperatuur en/of waterhardheid en in de snelheid en/of wrijving tijdens het mengen kunnen kleine veranderingen veroorzaken in de verwerkingstijd en de initiële uithardingstijd.

4. Plaats het lepelblad in de mond en houd het vast totdat het is uitgehard (minimaal 30 seconden).
5. Spoel de afdruck na uitharding zorgvuldig af met koud water, schud het overtollige af en desinfecteer (specifieke desinfectiemiddelen op alcoholbasis worden aanbevolen).
6. Door de afdruck in een afgesloten plastic zak te bewaren, kan het model binnen 120 uur worden gegoten. Voeg niets anders toe aan de zak.

Aanbevolen verhoudingen water/alginaat:

Half blad: ≈20 ml water +≈ 9 g alginaat

Vol blad: ≈40 ml water +≈18 g alginaat

Giet water in de mengkom en voeg daarna alginaat toe.

Volg de instructies van de fabrikant als u specifieke mechanische mixers voor afdruckmaterialen op basis van alginaat gebruikt.

WAARSCHUWING

Draag een gezichtsmasker, beschermende handschoenen, oogbescherming en beschermende kleding. Het poeder is "stofvrij", maar voorzichtigheid is geboden om inademing te voorkomen. Bij contact met de ogen grondig wassen met water.

**Opgelet**

Als zich een ernstig incident met betrekking tot het product voordoet, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

OPSLAG

Na opening onmiddellijk sluiten en in een gesloten verpakking bewaren. Bewaar op een koele, droge plaats.

**BATCHCODE/VERVALDATUM**

Zie de opdruk op de tas. Gebruik het product niet meer na deze datum.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

