

ImpressPLUS-chroomalgiinaat

Instructies voor gebruik

BELANGRIJK

Lees dit document 'Instructies voor gebruik' voor u het product in gebruik neemt. Dit product is alleen voor professioneel gebruik. **SPECIAAL SAMENGESTELD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE**
ImpressPLUS-chroomalgiinaat voldoet aan de ISO 21563 specificatie. Dit product is compatibel met pleisters type 3 en type 4 die voldoen aan ISO 6873.

IDENTIFICATIE

Stofvrij materiaal, maar voorzichtigheid is geboden bij het openen van de zak en het verwijderen van het poeder.

| | |
|---------------------|--|
| Productnaam | ImpressPLUS Chrome Alginate Fast Set Chromatic |
| Bedrijfsnaam | Perfection Plus Ltd |
| Bedrijfsadres | 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK |
| Telefoonnr. bedrijf | +44 (0) 2380 866 677 |

PRODUCTCODE - REF

PP010/1296 ImpressPLUS Chrome Alginate Fast Set Chromatic 450g

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Een eenvoudig te gebruiken afdruckmateriaal om basis- of eerste indrukken te maken. Geen speciale behandeling nodig voor gebruik.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor muntsmaak.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Keer de zak twee of drie keer om, om eventueel samengedrukt materiaal los te maken voor gebruik.
2. Doop de lepel lichtjes in het poeder, klop zachtjes en verwijder overtollig poeder met de spatel. *Verzegel de zak onmiddellijk na het aanbrengen van het poeder.* Zie de aanbevolen water-/algiinaatverhoudingen hieronder.
3. Doe in een schone, droge, flexibele mengkom eerst water, voeg dan poeder toe en meng krachtig.
4. De kleurveranderingen geven de verschillende werkfasen aan:

| Tabel met mengtijden en kleurveranderingen | |
|---|---|
| Mengtijd met een spatel - Violet | 60 seconden |
| Werktijd om de afdrucklepel te vullen - Lila | 1 minuut 50 seconden (inclusief 60 seconden mengtijd) |
| Initiële instelduur voor het inbrengen in de mond - Groen | 2 minuten (inclusief 1 minuut 50 seconden werktijd). |

Metingen uitgevoerd bij 23°C met gedeïoniseerd water. Variaties in de verhouding poeder/water, temperatuur en/of waterhardheid en in de snelheid en/of wrijving tijdens het mengen veroorzaken veranderingen in de verwerkingstijd en initiële uithardingstijd. De kleurveranderingen geven de verschillende werkfasen aan (zie bovenstaande tabel).

5. Plaats het lepelblad in de mond en houd het vast totdat het is uitgehard (minimaal 60 seconden).
6. Spoel de afdruck, indien uitgehard, voorzichtig af met koud water, schud overtolligs af en desinfecteer (een specifiek desinfectiemiddel op alcoholbasis wordt aanbevolen) en spoel het model.
7. Bewaar het algiinaat na gebruik goed afgesloten op een koele, droge plaats.

Aanbevolen verhoudingen water/algiinaat:

Half blad: ≈20 ml water +≈ 10.5 g algiinaat

Vol blad: ≈40 ml water +≈21 g algiinaat

Giet water in de mengkom en voeg daarna algiinaat toe.

Volg de instructies van de fabrikant als u specifieke mechanische mengers voor afdruckmaterialen op basis van algiinaat gebruikt.

WAARSCHUWINGEN

Draag een gezichtsmasker, beschermende handschoenen, oogbescherming en beschermende kleding. Het poeder is "stofvrij", maar voorzichtigheid is geboden om inademing te voorkomen. Bij contact met de ogen grondig spoelen met water.

**Opgelet**

Als zich een ernstig incident met betrekking tot het product voordoet, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteiten.

OPSLAG

Na opening onmiddellijk sluiten en in een gesloten verpakking bewaren. Bewaar op een koele, droge plaats.

**BATCHCODE/VERVALDATUM**

Zie de opdruk op de zak. Gebruik het product niet meer na deze datum.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

