

ProphyPLUS Single Dose Mode d'emploi

IMPORTANT

Lisez ce document « Mode d'emploi » avant de le manipuler. Ce produit est destiné à être utilisé par un professionnel des soins dentaires uniquement.

SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR UNE UTILISATION EN DENTISTERIE

IDENTIFICATION

Nom du produit	ProphyPLUS Single Dose Prophy Paste pk 200 cups
Nom de l'entreprise	Perfection Plus Ltd
Adresse de l'entreprise	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
N° de téléphone de l'entreprise	+44 (0) 2380 866 677

CODE PRODUIT- REF

PP010/0100 Medium Mint

PP010/0101 Coarse Mint

PP010/0102 Medium Cherry

PP010/0103 Coarse Cherry

PP010/0104 Funky Flavours with 200 stickers

La Pâte Prophylactique ProphyPLUS est un mélange d'agents de polissage et de nettoyage conçu pour un usage professionnel au cours des procédures d'hygiène dentaire/orthodontique standard. La Pâte Prophylactique ProphyPLUS est conditionnée sous forme de doses unitaires ou de pots.

INDICATIONS D'UTILISATION

Procédures de nettoyage et de polissage dans le cadre d'un traitement prophylactique dentaire/orthodontique administré par un professionnel. Si le produit contient du fluor, il n'est pas considéré comme un substitut à d'autres formes de traitement au fluor.

Mode d'emploi:

- 1.1. Si une dose unitaire est utilisée, remplir la cupule à l'aide d'un contre-angle de prophylaxie en enfonçant la face de la cupule dans la pâte tout en passant le contre-angle à faible vitesse.
- 1.2. Si un pot est utilisé, retirer une quantité de pâte suffisante pour terminer une intervention et la placer dans un godet de dosage propre ou un autre récipient approprié. Fermer immédiatement le couvercle après utilisation pour éviter toute perte d'humidité. Avec un contre-angle de prophylaxie, remplir la cupule en enfonçant la face de la cupule dans la pâte tout en passant le contre-angle à faible vitesse.
2. Exercer un contact rapide et léger de manière à ce que les bords de la cupule débordent légèrement et ce, tout en continuant à exercer un mouvement en partant de la dent. Maintenir une quantité de pâte suffisante sur la cupule pour éviter en surchauffe au niveau de la surface de la dent.
3. Il est recommandé d'évacuer la salive pour éviter la dilution et l'ingestion de la pâte.
4. Rincer complètement la bouche par pulvérisation d'eau.

MISES EN GARDE

- La pâte prophylactique doit être expectorée et non avalée.
- Le produit peut contenir du fluor. L'ingestion d'une quantité excessive de fluor peut provoquer des nausées. Voir l'étiquette extérieure pour plus de détails.
- Tenir hors de portée des enfants.

Attention

Selon la législation fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu par un dentiste, ou sur ordonnance d'un dentiste.

Prudence



En cas d'incident grave lié au produit, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

STOCKAGE

Ne pas stocker à une température supérieure à 25°C/77°F. Conserver à l'abri de la lumière du soleil directe. Voir l'emballage extérieur pour la date d'expiration.



Code de lot/Date d'expiration

Voir le pot pour le numéro de lot et la date d'expiration.

Distribué par: Perfection Plus Ltd, 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX



Dental Technologies
6901 North Hamlin
Avenue
Lincolnwood
Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road, Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com
Regulatory@perfectionplus.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

