

ConnectED

Kullanım Talimatları

ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca bir diş hekimi tarafından kullanılmak içindir.
DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR

TANIM

Tek adımda aşındırmak, astarlamak ve yapıştırmak için HEMA içermeyen hepsi bir arada yapıştırıcı. Mine ve dentine mükemmel bağlanma gücü sunar. Yapışma dayanıklılığı ve biyouyumluluk olağanüstüdür.

Ürün Adı	ConnectED
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

ÜRÜN KODU - REF

PP010/0120 - ConnectED Kiti

PP010/0121 - ConnectED 6ml şişe - Üçlü şişe paketi

PP010/0122 - ConnectED 6 şişe

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Kompozitler ve kompomerler ile kullanıma uygundur.

Yan Etkiler:

Az sayıda, benzer bileşimdeki ürünlerle temas alerjisi vakaları bildirilmiştir. Olası pulpal reaksiyonları önlemek için pulpal bölgedeki açığa kalan dentini uygun bir astar malzemesi ile koruyun (tercihen PerfectaLINE gibi bir kalsiyum hidroksit kavite astarı ile).

Etkileşimler:

Çinko oksit eugenol benzeri fenolik maddeler gibi bileşenleri nedeniyle polimerizasyonu engelleyebilecek kavite astarlarından kaçınınız.

KONTRENDİKASYONLAR

Pulpaya maruz kalma, pulpitis ve metakrilat reçineye karşı bilinen alerji.

KULLANIM TALİMATLARI

1 Diş yüzeyini temizleyin ve geleneksel yöntemleri izleyerek kaviteyi hazırlayın. Uygunsa rubber dam ile izole edin.

2 Kalan dentinin ince olduğu derin kavitelerde kalsiyum hidroksit kavite astar (PerfectaLINE) uygulayın.

3 İnce bir tabaka yapıştırıcı sürün ve 10 saniye bekletin. Yağsız hava ile 5 saniye boyunca nazikçe kurutun.

4 Perfect+ LED05 kürleme ışığı ile 5 saniye süreyle ışıkla kürleyin. Kavite artık kompozit veya kompomer restoratif ile doldurulmaya hazırdır.

UYARI!

Her kullanımdan sonra şişeyi kapatın. Malzemeyi çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Ağız mukozası ile doğrudan temas halinde bol su ile durulayın. Yutulması halinde zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilt temasında hassasiyete neden olabilir. Göz ile teması halinde derhal su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Cilt ile temasından sonra derhal bol sabun ve su ile yıkayın. Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz/yüz koruması kullanın. Yüksek derecede yanıcı sıvı.



Dikkat

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.



SAKLAMA

Buzdolabında saklayın (1-10°C).

Dikkat: Doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Dondurmayın.



Parti kodu/ Son Kullanma Tarihi

Tüm yazışmalarda parti numarası belirtilmelidir. Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile birlikte açık bir üretim tarihi, ay, yıl ve gün formatı verir. Gösterilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

