

Brana od lateksa Upute za korištenje

VAŽAN

Prije rukovanja pročitajte ovaj dokument 'Upute za uporabu'. Ovaj proizvod je namijenjen samo profesionalcima.
POSEBNO FORMULIRAN ZA UPOTREBU U STOMATOLOGIJI

IDENTIFIKACIJA

Naziv proizvoda	Brana od lateksa 6 x 6 pk 36
Naziv tvrtke	Perfection Plus d.o.o.
Adresa tvrtke	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Ujedinjeno Kraljevstvo
Broj telefona tvrtke	+44 (0) 2380 866 677

ŠIFRA PROIZVODA - REF

004/0032 Brana od lateksa 6 x 6 tanka zelena pk 36
004/0033 Brana od lateksa 6 x 6 srednje zelena pk 36
004/0034 Brana od lateksa 6 x 6 teška zelena pk 36

INDIKACIJE ZA UPORABU

Brane od lateks gume proizvode se od lateksa od prirodne gume. Zubna brana koristi se kao zaštitna oralna barijera tijekom endodontskih zahvata kako bi se smanjio rizik od infekcije, izoliralo radno područje, spriječilo prodiranje čestica ili sitnih predmeta u dišne putove pacijenta i poboljšala udobnost pacijenta. Zubna brana je jednokratni, neinvazivan, nesterilni uređaj koji je dizajniran da ga koriste samo kvalificirani stomatološki stručnjaci u opisanu svrhu.

KONTRAINDIKACIJE

Odgovornost je stomatologa da utvrdi je li uporaba zubne brane prikladna za svakog pojedinog pacijenta. Zubne brane od lateksa ne smiju se koristiti u situacijama kada je koža na odgovarajućem području slomljena, pacijent ima poznatu alergiju na lateks ili osjetljivost na alergene tipa IV ili druga klinička razmatranja ukazuju na to da se ne smije koristiti.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Uzmite list brane od lateksa i list gumene brane.
2. Postavite branu od lateksa na vrh predloška i prilagodite.
3. Pomoću markera odaberite koji je zub potreban za izolaciju.
4. Napravite rupu pomoću Perfection Plus probijača zubnih brana.
5. Razvucite branu od lateksa na metalni okvir brane.
6. Postavite stezaljku za zubnu branu u rupu i postavite oko zuba.

Zubna brana mora biti u dobrom stanju, jer neuspjeh u bušenju čiste rupe može dovesti do kidanja zubne brane.

USKLADIŠTENJE

Proizvod je zapaljiv i treba ga držati podalje od otvorenog plamena tijekom rukovanja i skladištenja.

Čuvati na temperaturi ispod 26°C i dalje od izravnih izvora topline.

Izbjegavajte vlažne uvjete skladištenja i držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

Izbjegavajte kontakt s bakrom, legurama koje sadrže bakar, uljima, otapalima i mastima.

Kutiju treba zatvoriti kada se ne koristi.



UPOZORENJE!

Zubne brane od prirodnog kaučukovuka od lateksa ne smiju se koristiti kod osoba koje su osjetljive na alergije na lateks od prirodne gume, ali se inače smatraju opasnim i sigurnim za upotrebu.

Proizvod sadrži aditive za preradu, uključujući ditiokarbonat, koji mogu uzrokovati preosjetljivost pri dodiru s kožom i izazvati alergije tipa IV. Osobe koje znaju da su osjetljive na ditiokarbonate trebaju izbjegavati kontakt s proizvodom.



Talk se smatra neopasnim u količinama prisutnim na proizvodu, ali treba izbjegavati kontakt s oštećenom kožom.

Proizvod smije koristiti samo kvalificirani stomatolog obučen za korištenje zubnih brana.

- Nemojte koristiti jastučić za zubne brane ako postoje znakovi oštećenja. Oštećene predmete odložite u skladu s lokalnim propisima
- Nemojte koristiti proizvod za zubnu branu u bilo koju drugu svrhu od one navedene u ovom priručniku.
- Proizvod se smije koristiti samo prije isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.
- Nemojte koristiti proizvod na djeci osim ako niste pod nadzorom kvalificiranog liječnika.
- Ovaj proizvod je samo za jednokratnu upotrebu. Nije prikladan za čišćenje

Opres



Ako dođe do ozbiljnog incidenta u vezi s proizvodom, o tome treba obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo.

BROJ SERIJE I DATUM ISTEKA ROKA VALJANOSTI

Gore navedeno je otisnuto na svakom pakiranju i treba ih navesti u svoj korespondenciji koja zahtijeva identifikaciju proizvoda. Nemojte koristiti proizvod nakon tog datuma. Pogledajte kutiju proizvoda za lot.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

