

EasiJect Sterile Needles

Οδηγίες χρήσης

Όνομα συσκευής

Αποστειρωμένες οδοντιατρικές βελόνες μιας χρήσης

Προβλεπόμενος σκοπός

Αποστειρωμένες οδοντιατρικές βελόνες έγχυσης μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε οδοντιατρική σύριγγα φυσιγγίο για έγχυση οδοντιατρικών τοπικών αναισθητικών.



Product Name	EasiJect Sterile Needles
Distributed by	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REF

PP013/0200	EasiJect Sterile Needles 27Gx21mm Pk 100 Imperial
PP013/0203	EasiJect Sterile Needles 27Gx35mm Pk 100 Imperial
PP013/0206	EasiJect Sterile Needles 30Gx12mm Pk 100 Imperial
PP013/0208	EasiJect Sterile Needles 30Gx21mm Pk 100 Imperial
PP013/0209	EasiJect Sterile Needles 30Gx25mm Pk 100 Imperial
PP013/0300	EasiJect Sterile Needles 27Gx21mm Pk 100 Metric
PP013/0301	EasiJect Sterile Needles 27Gx25mm Pk 100 Metric
PP013/0303	EasiJect Sterile Needles 27Gx35mm Pk 100 Metric
PP013/0306	EasiJect Sterile Needles 30Gx12mm Pk 100 Metric
PP013/0307	EasiJect Sterile Needles 30Gx16mm Pk 100 Metric
PP013/0308	EasiJect Sterile Needles 30Gx21mm Pk 100 Metric
PP013/0309	EasiJect Sterile Needles 30Gx25mm Pk 100 Metric
PP013/0310	EasiJect Sterile Needles 30Gx30mm Pk 100 Metric

Ομάδες-στόχοι ασθενών

Παιδιατρικοί έως ηλικιωμένοι ασθενείς όλων των φύλων που χρειάζονται ένεση τοπικού αναισθητικού για οδοντιατρική θεραπεία.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Οδοντίατροι

Ενδείξεις

Για οδοντιατρική θεραπεία

Αντενδείξεις

Υπερευαίσθησία σε μέταλλα, ιστορικό ανεπιθύμητης αντίδρασης στην ένεση στο παρελθόν


Ανεπιθύμητες παρενέργειες

Ο ανοξείδωτος χάλυβας περιέχει ίχνη νικελίου και χρωμίου, επομένως μπορεί να προκαλέσει αντίδραση σε άτομα με υπερευαίσθητο δέρμα.

Χαρακτηριστικό απόδοσης

Έγχυση οδοντιατρικών τοπικών αναισθητικών.

Μέθοδος χρήσης

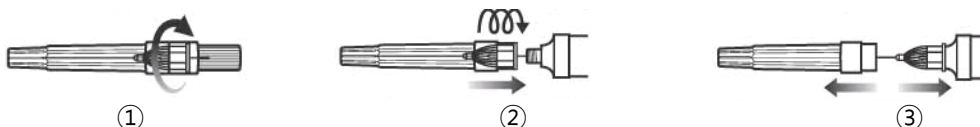

1. Σπάστε την ερμητική σφράγιση (περιστρέψτε το καπάκι για να ανοίξετε - μην λυγίζετε και μην ανοίγετε με τσάκιση).
2. Συνδέστε τη βελόνα στη σύριγγα του οδοντιατρικού φυσιγγίου.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι για να χρησιμοποιήσετε.

Συμβατή σύριγγα

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη σύριγγα κασέτας οδοντιατρικών φυσιγγίων παρακάτω ανάλογα με τον τύπο σπειρώματος του προϊόντος

- Σύριγγα οδοντιατρικών φυσιγγίων με μετρικό σπείρωμα - Σύριγγα οδοντιατρικών φυσιγγίων με σπείρωμα ιντσών

Προειδοποιήσεις



- Μην το χρησιμοποιήσετε προτού ελέγξετε τις οδηγίες χρήσης
- Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία του είναι σπασμένη
- Μην επαναχρησιμοποιείτε, κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης του ασθενούς
- Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει
- Μην κάμπτετε τις βελόνες. Μπορεί να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες βελόνες αμέσως σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανονισμούς.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

- Η χρήση από μη προβλεπόμενο χρήστη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς.
- Η χρήση της βελόνας σε ασθενείς με υπερευαισθησία στο μέταλλο και ιστορικό ανεπιθύμητης αντίδρασης στην ένεση στο παρελθόν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς.
- Η επαναχρησιμοποίηση της βελόνας μπορεί να προκαλέσει μια εκ νέου ή διασταυρούμενη μόλυνση.
- Χρήση ληγμένου προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει μόλυνση.
- Η χρήση ληγμένου προϊόντος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει την προβλεπόμενη απόδοση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.
- Η χρήση ακατάλληλης σύριγγας μπορεί να προκαλέσει διαρροή τοπικών αναισθητικών.
- Η ακατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης βελόνας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από βελόνα, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια εκ νέου ή διασταυρούμενη μόλυνση.
- Η χρήση βελόνας με σπασμένη σφράγιση μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
- Η χρήση χωρίς έλεγχο των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς λόγω παράλειψης των σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών.
- Η κάμψη των βελόνων μπορεί να προκαλέσει θραύση της βελόνας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς.












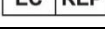

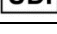



Κατάσταση αποθήκευσης

Θερμοκρασία δωματίου

Σημείωση

Εάν συνέβη οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και αρμόδια αρχή.

EXPLANATION OF SYMBOLS USED

	Αριθμός καταλόγου		Μη αποστειρωμένο
	Κωδικός παρτίδας		Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως
	Ημερομηνία λήξης		Όριο θερμοκρασίας
	Βιομήχανος		Προσοχή
	Distributor		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εισαγωγέας		Ec Rep
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		UDI
	ΕΟ Αποστείρωση		Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Μην επαναχρησιμοποιείτε		



C-K Dental Ind.
88-50, Sudo-ro, Bucheon-si
Gyeonggi-do
Republic of Korea
ck-dental@hanmail.net
Tel: +82-32-679-1204
Fax: +82-32-679-1207



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road, Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53,
1030 Brussels,
Belgium
Tel: +32-2-732-59-54
Fax: +32-2-732-60-03
Email: mail@obelis.net



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

