

Eco+ Profilaksi Macunu

Kullanım Talimatları

ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca profesyonel kullanım içindir.
DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR

TANIM

Dentinal ve post-operatif hassasiyetin tedavisi için profilaksi macunu.

Ürün Adı	Eco+ Profilaksi Macunu
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

ÜRÜN KODU - REF

PP095/4000 – Orta Kıvamlı Nane Aromalı

PP095/4001 – İri Kıvamlı Kiraz Aromalı

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Profilaksi macunu tiksotropiktir: bu nedenle istenirse, macunun akışkanlığı kullanımdan önce nazıkçe spatülasyonla artırılabilir. Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. En iyi sonuçlar için prophy tipi el aleti ve kap/fırça kombinasyonu ile kullanın.

KULLANIM TALİMATLARI

Kabı/fırçayı macunla doldurun ve düşük hızda her bir diş yüzeyinde gezdirin, kabın/fırçanın kenarının dişeti sulkusunun serbest kenarının altına indiğinden emin olun. Açıkta kalan tüm yüzeyler tedavi edilene kadar bu prosedürü her diş için tekrarlayın. Ağdasız Diş İpi, fazla macunu interproksimal alanlardan çıkarmak için kullanılabilir.

SAKLAMA

Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. Serin ve kuru bir ortamda saklayın.



PARTİ KODU/SON KULLANMA TARİHİ

Tüm yazışmalarda parti numarası belirtilmelidir. Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile birlikte açık bir üretim tarihi, ay, yıl ve gün formatı verir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Dikkat



Ürüne ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place
Dublin, Ireland
DO7 P4AX
regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

