

ImpressPLUS Alginate Instructies voor gebruik

BELANGRIJK

Lees dit document 'Instructies voor gebruik' voor u het product in gebruik neemt. Dit product is alleen voor professioneel gebruik.

SPECIAAL SAMENGESTELD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE

ImpressPLUS Alginate voldoet aan de ISO 21563 specificatie. Dit product is compatibel met pleisters type 3 en type 4 die voldoen aan ISO 6873.

IDENTIFICATIE

Stofvrij materiaal, maar voorzichtigheid is geboden bij het openen van de zak en het verwijderen van het poeder.

Productnaam	ImpressPLUS Alginate
Bedrijfsnaam	Perfection Plus Ltd
Bedrijfsadres	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Telefoonnr. bedrijf	+44 (0) 2380 866 677

PRODUCTCODE - REF

PP010/1294 ImpressPLUS Alginate Regular Set 450g

PP010/1295 ImpressPLUS Alginate Fast Set 450g

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Een eenvoudig te gebruiken afdruckmateriaal om basis- of eerste indrukken te maken. Geen speciale behandeling nodig voor gebruik.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor muntsmaak.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Keer de zak twee of drie keer om, om eventueel samengedrukt materiaal los te maken voor gebruik.
2. Doop de lepel lichtjes in het poeder, klop zachtjes en verwijder overtollig poeder met de spatel. *Verzegel de zak onmiddellijk na het aanbrengen van het poeder.* Zie de aanbevolen water-/alginaatverhoudingen hieronder.
3. Doe in een schone, droge, flexibele mengkom eerst water en voeg dan poeder toe en meng krachtig.

Tabel met mengtijden - reguliere set

Mengtijd met spatel	60 seconden
Werktijd om de afdrucklepel te vullen	2 minuut 50 seconden (inclusief 60 seconden mengtijd)
Initiële instelduur voor het inbrengen in de mond	3 minuten (inclusief 2 minuut 50 seconden werktijd).

Tabel met mengtijden - snelle set

Mengtijd met spatel	60 seconden
Werktijd om de afdrucklepel te vullen	1 minuut 50 seconden (inclusief 60 seconden mengtijd)
Initiële instelduur voor het inbrengen in de mond	2 minuten (inclusief 1 minuut 50 seconden werktijd).

Metingen uitgevoerd bij 23°C met gedeïoniseerd water. Variaties in de verhouding poeder/water, temperatuur en/of waterhardheid en in de snelheid en/of wrijving tijdens het mengen veroorzaken veranderingen in de verwerkingstijd en initiële uithardingstijd.

4. Plaats het lepelblad in de mond en houd het vast totdat het is uitgehard (minimaal 60 seconden).
5. Spoel de afdruck, indien uitgehard, voorzichtig af met koud water, schud overtolligs af en desinfecteer (een specifiek desinfectiemiddel op alcoholbasis wordt aanbevolen) en spoel het model.
6. Bewaar het alginaat na gebruik goed afgesloten op een koele, droge plaats.

Aanbevolen verhoudingen water/alginaat:

Half blad: ≈20 ml water +≈ 10.5 g alginaat

Vol blad: ≈40 ml water +≈21 g alginaat
Giet water in de mengkom en voeg daarna alginaat toe.

Volg de instructies van de fabrikant als u specifieke mechanische mixers voor afdruckmaterialen op basis van alginaat gebruikt.

WAARSCHUWING

Draag een gezichtsmasker, beschermende handschoenen, oogbescherming en beschermende kleding. Het poeder is "stofvrij", maar voorzichtigheid is geboden om inademing te voorkomen. Bij contact met de ogen grondig wassen met water.



Opgelet



Als zich een ernstig incident met betrekking tot het product voordoet, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

OPSLAG

Na opening onmiddellijk sluiten en in een gesloten verpakking bewaren. Bewaar op een koele, droge plaats.



BATCHCODE/VERVALDATUM

Zie de opdruk op de zak. Gebruik het product niet meer na deze datum.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

