

## Prophy Paste

### Gebruiksaanwijzing

#### **BELANGRIJK**

Lees voor gebruik deze Gebruiksaanwijzing. Dit product is uitsluitend voor professioneel gebruik.  
**SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE**

#### **IDENTIFICATIE**

Profylaxepasta voor de behandeling van dentinale en post-operatieve gevoeligheid.

Naam product	Prophy Paste
Naam bedrijf	Perfection Plus Ltd
Adres bedrijf	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, VK
Telefoonnr. bedrijf	+44 (0) 2380 866 677

#### **PRODUCTCODE** REF

PP010/0001 – Perfection Plus Medium Munt 250g  
PP010/0002 – Perfection Plus Medium Sinaasappel 250g  
PP010/0046 – Perfection Plus Grof Munt 250g  
PP010/0047 – Perfection Plus Grof Sinaasappel 250g  
PP095/4000 – Eco+ Medium Munt 300g  
PP095/4001 – Eco+ Grof Sinaasappel 300g  
PP010/0051 – Perfection Plus Olievrij Medium Munt 300g  
PP010/0054 – Perfection Plus Olievrij Medium Sinaasappel 300g  
PP010/0053 – Perfection Plus Olievrij Grof Munt 300g  
PP010/0052 – Perfection Plus Olievrij Grof Sinaasappel 300g

#### **EIGENSCHAPPEN**

Bevat geen fluoride en alleen natuurlijke smaakstoffen. Het schuurmiddelmengsel dat wordt gebruikt in de verschillende grofheden zijn om zoveel mogelijk plak en tandsteen te verwijderen zonder noemenswaardig afslijten van het glazuur.

#### **INDICATIES VOOR GEBRUIK**

De prophy pasta (of polijstpasta) is thixotrop: indien gewenst kan de pasta vloeibaarder worden gemaakt door vóór gebruik voorzichtig te spatuleren. Plaats na gebruik het deksel terug. Voor de beste resultaten gebruiken met een speciaal polijsthandstuk en een cup/borstel-combinatie.

#### **GEBRUIKSAANWIJZING**

Vul de cup/borstel met pasta en laat op lage snelheid over elk tandoppervlak gaan. Zorg er hierbij voor dat de rand van de cup/borstel onder de vrije marge van de gingivale sulcus (het tandvlees) komt. Herhaal deze procedure bij elke tand tot alle blootliggende oppervlakken zijn behandeld. Flosdraad zonder wax kan worden gebruikt om eventuele overtollige pasta te verwijderen in interproximale gebieden.



#### **OPSLAG EN VERWIJDERING**

Plaats na gebruik het deksel terug. In koele en droge omstandigheden bewaren.  
Afvoeren in overeenstemming met alle lokale en nationale voorschriften. Niet in de afvoer gieten.  
Lege verpakkingen niet hergebruiken.

#### **WAARSCHUWING**

Stel patiënten of gebruikers met een bekende allergie voor een van de bestanddelen van dit materiaal niet bloot aan de pasta. Vermijd contact met de ogen en huid. In geval van contact grondig spoelen met water en medische hulp inschakelen als de symptomen aanhouden.



#### **LET OP**

Mocht zich een ernstig incident voordoen met het product, dan moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie.

#### **BATCHCODE/VERVALDATUM**

Het partijnummer moet op alle correspondentie worden vermeld. De batchcode bestaat uit een open productiedatum in de opmaak maand, jaar en dag, met daarachter een cijfer voor unieke identificatie van de partij van het materiaal. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Totton  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St. Marys Place  
Dublin, Ireland  
D07 94AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

