

## RestorePLUS

### Kullanım Talimatları

#### ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca bir diş hekimi tarafından kullanılmak içindir. Hem anterior hem de posterior kullanım için gelişmiş florür içeren kompozit. Mükemmel aşınma direnci, estetik ve dentinin iki katı radyopasite. 9 renk seçeneği mevcuttur.

#### TANIM

Ürün Adı	RestorePlus
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

#### ÜRÜN KODU - REF

PP010/1730 20 x 0,25 g Kapsül A1	PP010/1700 4g Şiringa A1
PP010/1732 20 x 0,25 g Kapsül A2	PP010/1702 4g Şiringa A2
PP010/1734 20 x 0,25 g Kapsül A3	PP010/1704 4g Şiringa A3
PP010/1736 20 x 0,25 g Kapsül A3.5	PP010/1706 4g Şiringa A3.5
PP010/1738 20 x 0,25 g Kapsül A4	PP010/1708 4g Şiringa A4
PP010/1740 20 x 0,25 g Kapsül B2	PP010/1710 4g Şiringa B2
PP010/1744 20 x 0,25 g Kapsül C2	PP010/1714 4g Şiringa C2
PP010/1746 20 x 0,25 g Kapsül BW	PP010/1716 4g Şiringa BW
	PP010/1725 4g Şiringa UO (Universal Opak)

#### KULLANIM ENDİKASYONLARI

Anterior ve posterior kaviterler I, II, III IV ve V, kamalı şekilli defektler ve kök kaviterleri, direkt laminat veneerler, core build up'lar ve kırılmış laminat veneer ve porselenlerin onarımı.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Diş yüzeyini temizledikten sonra ve diş hala nemliyen renk tonunu kontrol edin.

Boşluğu geleneksel şekilde hazırlayın, uygun olan yerlerde eğimli bir kenar kullanın. Pulpa açığa çıkmışsa veya restorasyona yakınsa PerfectaLINE gibi bir kalsiyum hidroksit liner kullanılmalıdır.

Yapıştırma maddesini üreticinin talimatlarına göre uygulayın. PerfectEtch ve Connect+ tavsiye edilir.

Gerekli miktarda malzemeyi şiringadan veya kapsülden boşluğa dağıtın. Şiringa kullanıyorsanız, dağıtımdan hemen sonra şiringa kolunu saat yönünün tersine 360° çevirerek basıncı boşaltın. Kullandıktan sonra şiringa kapağını daima değiştirin. Kısmen kullanılmış kapsüller atılmalıdır. Restorasyonu yerleştirip konturladıktan sonra ışık ünitesi ile kürleyin. Aşağıdaki tablodan ışıkla kürlenme süresini seçin. Restorasyonun tüm yüzeyini ışıkla kürleyin. Derin boşluklar için katmanlama tekniği önerilir. 2mm derinliğe kadar bir tabaka halinde yerleştirin ve bir dental ışık kür ünitesi ile kürleyin.

Işıklı Kürleme Ünitesi	LED	Halojen
Işıklı Kürlenme Süresi	10 saniye	20 saniye
Dalga boyu	440-490 nm	400-500 nm
Işık Yoğunluğu	≥ 1000 <sup>mW/cm2</sup>	≥ 500 <sup>mW/cm2</sup>

Yukarıda tarif edilenlere eşdeğer özelliklere sahip bir dental ışıkla sertleştirme ünitesi kullanın. Farklı önerilere sahip bir ünite kullanıyorsanız, üreticinin talimatlarını uygulayın.

Kürendikten sonra, fazla malzemeyi aşındırıcı taşlar ve uçlarla temizleyin ve ardından cilalayın.

#### UYARILAR/ÖNLEMLER

Bu ürünü *metakrilat reçinesine* ve/veya metakrilat monomerine karşı alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayın.

Bu ürünü kullanan bir hastada herhangi bir kızarıklık veya deri iltihabı meydana gelirse derhal kullanmayı bırakın ve hastanın tıbbi yardım almasını sağlayın.

Yumuşak dokulara, cilde veya gözlere temas etmekten kaçınınız. Temas halinde derhal bol miktarda su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Eğer bir kavite derinse, pulpa kapatıcı bir madde ile koruyun. **(N.B. Öjenol içeren astar kullanmayın)**

Işıklı kürleme sırasında UV koruyucu gözlük takın.

Uygulama sırasında sertleşmemiş simanın diş harici yapıya temas etmesini önleyin.

Bu ürün diş hekimliğinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir ve sadece diş hekimleri tarafından kullanılması amaçlanmıştır.



**KONTRENDİKASYONLAR**

Bu ürünü, KULLANIM TALİMATLARI'nda özellikle belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.

**Dikkat**

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.

**SAKLAMA**

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve oda sıcaklığında (1-30°C) saklayın.

**Parti kodu/ Son Kullanma Tarihi**

Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile birlikte açık bir üretim tarihi, ay, yıl ve gün formatı verir. Lütfen tüm yazışmalarda bu parti numarasını belirtin. Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilir. Bu tarihten sonra ürünü kullanmayın.

Önemli not: Şırıngada sıkışmayı ve erken sertleşmeyi önlemek için, lütfen her kullanımdan sonra basıncı boşaltmak için vidayı 360° geri sarın. Bu aynı zamanda kapağın içine fazla malzeme girmesini ve düzensiz kıvamı önler.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Yolu  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

