

Gebrauchsanweisung (German)

• **Gerätebezeichnung:** Sterile zahnärztliche Einwegnadeln



• **Verwendungszweck:** Sterile zahnärztliche Injektionsnadeln für den Einmalgebrauch, die in zahnärztlichen Kartuschenspritzen verwendet werden für die Injektion zahnärztlicher Lokalanästhetika.

• **Patienten-Zielgruppen:** Pädiatrische bis ältere Patienten aller Geschlechter, die eine Injektion eines Lokalanästhetikums für eine Zahnbehandlung benötigen.

• **Bestimmungsgemäße Nutzer:** Zahnärzte

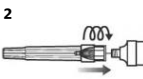
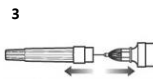
• **Indikationen:** Zur Zahnbehandlung

• **Kontra-Indikationen:** Metallüberempfindlichkeit, Unerwünschte Reaktion auf Injektion in der Vergangenheit

• **Unerwünschte Nebeneffekte:** Edelstahl enthält Spuren von Nickel und Chrom und kann daher eine Reaktion bei überempfindlicher Haut auslösen.

• **Handlungsmerkmal:** Injektion von dentalen Lokalanästhetika.

• Anwendungsmethode

		
¹ Zerschneiden Sie die hermetische Versiegelung (drehen Sie die Kappe zum Öffnen - nicht knicken oder aufschnappen). ² Stecken Sie die Nadel an der zahnärztlichen Kartuschenspritze auf. ³ Die Schutzkappe vor der Anwendung entfernen.		

• **Kompatible Spritze:** Verwenden Sie die passende Dentalkartuschenspritze unten entsprechend dem Gewindetyp des Produkts.
 - Dentalkartuschenspritze mit metrischem Gewinde - Dentalkartuschenspritze mit zölligem Gewinde

• Warnhinweise

- Nicht verwenden, bevor Sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben
- Nicht verwenden, wenn das Siegel aufgebrochen ist
- Nicht wiederverwenden, Risiko einer Kreuzinfektion beim Patienten
- Nicht verwenden, wenn das Ablaufdatum überschritten ist
- Nicht die Nadeln verbiegen. Dadurch kann die Nadel zerbrechen und dies zu Verletzungen führen
- Entsorgen Sie gebrauchte Nadeln sofort in einem Behälter für scharfe/spitze Gegenstände gemäß der örtlichen Vorschriften.

• Restliche Risiken:

- Die Verwendung durch einen unbefugten Benutzer kann zu Verletzungen des Patienten führen.
- Die Verwendung der Nadel bei Patienten mit einer Metallüberempfindlichkeit und unerwünschten Reaktionen auf Injektionen in der Vergangenheit kann beim Patienten eine Verletzung hervorrufen.
- Die Wiederverwendung der Nadel kann zu einer Re- oder Kreuzinfektion führen.
- Die Verwendung eines abgelaufenen Produktes kann zu einer Infektion führen.
- Bei Verwendung eines abgelaufenen Produkts kann die beabsichtigte Wirkung möglicherweise nicht erreicht werden, was zu Verletzungen des Patienten führen kann.
- Die Verwendung einer ungeeigneten Spritze kann zum Auslaufen von Lokalanästhetika führen.
- Die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Nadeln kann zu Nadelstichverletzungen führen, die eine Re- oder Kreuzinfektion zur Folge haben können.
- Die Verwendung einer Nadel mit gebrochenem Siegel kann eine Infektion verursachen.
- Die Verwendung ohne Überprüfung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen des Patienten führen, weil sicherheitsrelevante Informationen nicht beachtet werden.
- Das Biegen von Nadeln kann zu Nadelbrüchen führen, was wiederum Verletzungen beim Patienten zur Folge haben kann.

• **Lagerungsbedingung:** Raumtemperatur

• **Hinweis:** Wenn ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetreten ist, melden Sie ihn bitte dem Hersteller und/oder einem bevollmächtigten Vertreter und einer zuständigen Behörde.

 Perfection Plus Ltd 6 Westwood Court Brunel Road, Totton Hampshire SO40 3WX, UK www.perfectionplus.com Regulatory@perfectionplus.com	 C-K DENTAL IND.CO.,LTD. 88-50, Sudo-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea Tel: +82-32-679-1204, Fax: +82-32-679-1207 Email: ck-dental@hanmail.net	 OBELIS S.A. Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium Tel: +32-2-732-59-54, Fax: +32-2-732-60-03 Email: mail@obelis.net
--	--	--