

ImpressPLUS Clear

A Termék Ismertetése

A **ImpressPLUS Clear** egy átlátszó, mindenféle átlátszó matricákat igénylő harapásvételhez alkalmazható, polivinilsziloxánokon alapuló anyag. Ezek az átlátszó matricák a leplezési technikához (módszerhez) [veneering technique] alkalmazhatók.

AZONOSÍTÁS

Termék név	ImpressPLUS Clear
Cégnév	Perfection Plus Ltd
Cég címe	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Céges telefonszám	+44 (0) 2380 866 677

TERMÉKKÓD - REF

010/0348 – ImpressPLUS Clear 50ml x2 & Tips

Műszaki Adatok	
ISO 4823	B típus: harapásvételi (harapásrögzítő) anyagok
Indikációk	- Valóság-hű okkluzális lenyomatvételek - Lényegi anyag regisztrálótűvel történő regisztráláshoz - Kis mintaszegmensek előállításához - Kompozit helyreállításokhoz lényeges szilikon
*Teljes megmunkálhatósági idő (perc)	1:00
Szájbeli idő (perc)	2:00
*Teljes kötési idő (perc)	3:00
Lineáris méretváltozás, (%)	<0.3
Shore A keménység	70±2

***Figyelem!** Alkalmazási feltételek: 23°C ± 2°C / 73°F ± 4°F, 50 ± 5% relatív páratartalom. Az ennél magasabb hőmérsékletek csökkentik a megmunkálhatósági és a kötési időt, az alacsonyabb hőmérsékletek pedig meghosszabbítják azokat.

A termék rendeltetése: Fogászati lenyomatanyag

Alkalmazási környezet: Fogászat

Betegcélcsoport: Fogászati eljárás során kezelték, kortól és nemtől függetlenül.

A PATRON FELSZERELÉSE [MOUNTING]

Illesse be a patronot az adagolópisztolyra a gyártó utasításai szerint eljárva, és vegye le a kupakot. Préselje kifelé a lenyomatanyagot egyenlő sebességgel, amíg az ki nem ér mindkét üregből, majd szerelje rá a megfelelő keverőcsőrt. A keverőcsőrré rá lehet helyezni egy intraorális csúcsot.

FELHORDÁS – HARAPÁSVÉTELEK

Hordja fel a harapásvételi (harapásrögzítő) anyagot a kívánt technikának (módszernek) megfelelően (okkluzális vagy bukkális). Préselje ki az anyagot először azokra a részekre, ahol a fogak preparálása megtörtént, a légbuborék-képződések elkerülése érdekében a keverőcsőr végét mindig az anyagba merítve tartva, és kérje meg a beteget a harapásra. Az ajánlott idő elteltével óvatosan távolítsa el a megkötött harapáslenyomatot. Távolítsa el a szájból az anyag összes maradványát. A harapáslenyomat faragásával (trimmelésével) biztosítsa a mintára való jó ráilleszkedést. Használat után tartsa a keverőcsőrt a patronon, az ugyanis kupakként funkcionál. Az intraorális csúcsok és a keverőcsőrök kizárólag egyszeri használatra valók.

FELHORDÁS – ÁTLÁTSZÓ MATRICA

Hordja fel a ImpressPLUS Clear készítményt a megfelelő lenyomatanyag-kanálra, a légbuborék-képződések elkerülése érdekében a keverőcsőr végét mindig az anyagba merítve tartva, és helyezze a szájba. Az ajánlott idő elteltével óvatosan távolítsa el a megkötött matricát. Öblítse le vízzel, és szárítsa meg légfúvóval [blow dry with air]. Készítse elő a fogakat a kívánt technikának (módszernek) megfelelően, a kompozitanyag gyártójának a használati útmutatója szerint eljárva. Hordja fel a kompozitot az átlátszó matricára, és igazítsa a megfelelő helyzetbe a szájban. Fénypolimerizálja végig a matricát az annak megfelelő használati útmutató szerint eljárva. Használat után tartsa a keverőcsőrt a patronon, az ugyanis kupakként funkcionál. Az intraorális csúcsok és a keverőcsőrök kizárólag egyszeri használatra valók.

FERTŐTLENÍTÉS

Amikor kivették a lenyomatot a szájból, öblítse le langyos vízzel. A lenyomat ezután fertőtleníthető megfelelő fertőtlenítősoldatokkal vagy szprékkel, mint például a 2%-os glutáraldehid. Ügyeljen arra, hogy a gyártó használati utasításainak megfelelően járjon el! A lenyomatok fertőtlenítésével kapcsolatos további információkért: JADA 1991; vol. 122; IS(8); p110. Amennyiben a fertőtlenítést hidrogén-peroxiddal végzik, alaposan öblítse le langyos vízzel, nehogy buborékok képződjenek!

ÓVINTÉZKEDÉSEK, ELŐVIGYÁZATOSSÁGI TUDNIVALÓK

- A latexkesztyűkkel való érintkezés ronthatja a kötési reakciót. Érdemes lehet vinilkesztyűt alkalmazni
- Az eugenol, illetve bizonyos hemosztatikus anyagok ronthatják a kötési reakciót
- Nem szabad kombinálni kondenzációsan kötő szilikonokkal, poliéterrel és polisulfiddal
- Ügyelni kell arra, hogy az anyag ne fröccsenjen a ruházatra, az ugyanis vegyi tisztítással nem távolítható el
- Az anyag szemmel való érintkezését el kell kerülni. Érintkezés esetén a szemeket bő vízzel le kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni
- Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- A lejárat dátum után ne használják!

TÁROLÁS

A termék 10-25°C (50-77°F)-on tárolandó. A lenyomat szobahőmérsékleten (max. 25°C/77°F) tárolandó.



A GYÁRTÁSI TÉTEL (LOT) SZÁMA ÉS A LEJÁRATI DÁTUM

A fentiek rá vannak nyomtatva minden csomagra, és célszerű azokat feltüntetni minden olyan kommunikáció során, amelynél szükséges a termék beazonosítása.

ELLENJAVALLATOK

A fenti anyag alkalmazása ellenjavallott:

- Ha ismert egy betegről, hogy túlérzékeny vagy allergiás valamelyik összetevőre
- Hogyha egy betegnek vannak laza fogai; azok ugyanis egy lenyomatvételtől továbbblazulhatnak vagy kihúzódhatnak

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék ártalmatlanítását (hulladékként való elhelyezését) a helyi szabályozásoknak megfelelően végezze, azok relevanciája szerint!

HASZNÁLÓK / KIZÁRÓLAG SZAKMAI HASZNÁLATRA

Ezeket az anyagokat kizárólag fogászati szakemberek általi használatra fejlesztették ki, és a használati útmutatónak megfelelően kell velük bántani. Az útmutatóban szereplő ajánlások igazodnak a fogászati módszertan aktuális/tényleges állásához. Ez nem mentesíti a használót az alól, hogy megállapítsa a terméknek a rendeltetésére való alkalmasságát. Az eltérő alkalmazások, illetve a helytelen kezelés/bánás által okozott károkért a gyártó nem vonható felelősségre.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK



Ha ezzel az eszközzel összefüggő komoly incidens fordul elő, azt minden esetben ajánlott bejelenteni a gyártó és az illetékes hatóság részére.

SZIMBÓLUMJEGYZÉK

	Orvostechnikai eszköz		Katalógusszám
	Olvassa el a használati útmutatót		Gyártási tétel [batch] kódja
	Vigázat/Figyelmeztetés		Lejárat dátum
	Közvetlen napfénytől óvni		Egyedi eszközazonosító
	Hőmérséklet határ		Gyártó
	Importőr		CE-jelölés (európai műszaki megfelelés)
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

