

Бързотвърдяващ алгинат ImpressPLUS-5

Инструкции за употреба

ВАЖНО

Прочетете този документ с инструкции за употреба преди използване на продукта. Този продукт е само за професионална употреба.

СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАН ЗА УПОТРЕБА В СТОМАТОЛОГИЯТА

Алгинатът ImpressPLUS-5 съответства на спецификацията по ISO 21563. Този продукт е съвместим с гипсове от клас 3 и клас 4, които съответстват на ISO 6873.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Материал, който не води до образуване на фин прах, но се препоръчва повишено внимание при отваряне на пакета и вземане на прахообразния продукт.

Наименование на продукта	Бързотвърдяващ алгинат ImpressPLUS-5
Наименование на фирмата	Perfection Plus Ltd
Адрес на фирмата	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Обединено кралство
Телефонен номер на фирмата	+44 (0) 2380 866 677

КОД НА ПРОДУКТА - REF

PP010/1299 Бързотвърдяващ алгинат ImpressPLUS-5

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Лесен за употреба материал за отпечатъци за вземане на основни или първи отпечатъци. Не е необходимо специално третиране преди употреба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при пациенти с алергия към аромат мента *или алергия към оцветител основно червено 1:1*.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Обърнете пакета два или три пъти, за да раздробите уплътнения материал преди употреба.
- Потопете внимателно лъжичката в прахообразния продукт, потупайте леко и отстранете излишния продукт с шпатулата. *Затворете пакета веднага след вземане на необходимото количество прахообразен продукт.* Моля, вижте препоръчителните съотношения на вода/алгинат, посочени по-долу.
- В чиста, суха и мека купа за разбъркване налейте първо вода, след което добавете прахообразния продукт и разбъркайте енергично.

Таблица на необходимото време за разбъркване

Време за разбъркване с шпатула	45 секунди
Време за работа за зареждане на лъжичката за отпечатък	1 минута и 45 секунди (включително 45 секунди време за разбъркване)
Първоначално време за втвърдяване за поставяне в устата	1 минута и 55 секунди (включително 1 минута и 45 секунди време за работа). Само 30 секунди в устата.

Измерванията са направени при температура 23°C с дейонизирана вода. Промените в съотношението прахообразен продукт/вода, температурата и/или твърдостта на водата и в скоростта и/или търкането по време на разбъркване могат да доведат до леки промени във времето за работа и времето за първоначално втвърдяване.

- Поставете лъжичката в устата и дръжте стабилно до втвърдяване (минимум 30 секунди).
- След втвърдяване изплакнете отпечатъка внимателно със студена вода, изтръскайте излишното количество и дезинфекцирайте (препоръчват се специални дезинфектанти на основата на алкохол).
- При съхранение на отпечатъка в запечатана пластмасова торбичка моделът може да се изработи в рамките на 120 часа. Не добавяйте нищо друго към торбичката.

Препоръчителни съотношения на вода/алгинат:

Запълване на лъжичката за отпечатък наполовина: ≈20 ml вода +≈ 9 g алгинат

Запълване на лъжичката за отпечатък изцяло: ≈40 ml вода +≈ 18 g алгинат

Налейте вода в купата за смесване и след това добавете алгинат.

Ако използвате специални механични миксери за материали за отпечатъци на основата на алгинат, следвайте инструкциите на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Носете маска на лицето, предпазни ръкавици, защита за очите и предпазно облекло. Прахообразният продукт не образува фин прах, но се препоръчва повишено внимание, за да се избегне вдишване. В случай на контакт с очите измийте добре с вода.



Внимание



В случай на сериозен инцидент, свързан с продукта, това трябва да се съобщи на производителя и на компетентния орган.

СЪХРАНЕНИЕ

След отваряне *затворете незабавно след вземане на необходимото количество и съхранявайте в запечатан съд. Да се съхранява на хладно и сухо място.*



КОД НА ПАРТИДА/СРОК НА ГОДНОСТ

Вижте печата на пакета. Не използвайте продукта след тази дата.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

